



Gebrauchs- und Pflegeanleitung Dynair® Comfort Keil-Ballkissen®

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Dynair® Comfort Keil-Ballkissen®.

Mit dem Dynair® Comfort Keil-Ballkissen® haben Sie sich für ein TOGU® Markenprodukt „made in Germany“ entschieden! Als Sportgerät ist es entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert und enthält keine verbotenen Phthalate und keine Schwermetalle.

Der Sitz-Klassiker für Büro, zu Hause und unterwegs. Neu aus weicherem Material und mit effektiver Entlastungszone. Das Dynair gibt ein stabiles Sitzgefühl mit gleichzeitigem Balance-Effekt. Ein ergonomisch geformtes und anpassungsfähiges Luftkissen für bewegtes und aktives Sitzen. Fördert das Gleichgewicht, stärkt die Rückenmuskulatur ganz nebenbei und kann Rückenbeschwerden lindern.

Durch die Keilform unterstützt es außerdem die aufrechte Haltung. Gleichmäßige Druckverteilung für eine venenoptimierte Unterstützung der Oberschenkel. Es vereint die Vorteile des Ballkissens und des Keilkissens optimal in einem Produkt

Kleine Gerätekunde:

Das Dynair® Comfort Keil-Ballkissen® ist aus hochwertigem Ruton mit Nadelventil hergestellt.

Durchmesser: ca. 40 cm
Belastbarkeit: ca. 150 kg

Temperatur-Beständigkeit:

Das Dynair® ist UV-beständig und auch bedingt hitzebeständig. Bis 45°C kann das Comfort Keil-Ballkissen® problemlos eingesetzt werden. Es sollte jedoch nicht bei direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden (z.B. am Fenster). Das Material wird durch zunehmende Wärme weicher.

Das Dynair® Comfort Keil-Ballkissen® ist auch kältebeständig, jedoch sollte die Lagerungstemperatur nicht unter -10°C liegen. Das Material wird durch zunehmende Kälte fester.

Pflege:

Zum Reinigen des Dynair® Comfort Keil-Ballkissens® können Sie alle milden, handelsüblichen Reinigungsmittel sowie Desinfektionsmittel verwenden. Lösungsmittelhaltige, säurehaltige oder ätzende Reiniger greifen das Material an. Das Ballkissens® ist wasserfest.

Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen.

Aufpumpen:

Das Comfort Keil-Ballkissen® wird optimal mit Luft befüllt ausgeliefert.

Sie sollten stets darauf achten, dass die Oberfläche "plan" ist.

Im Bedarfsfall können Sie die Luftmenge mit einer Nadelventilpumpe (z.B. der TOGU Pumpe oder mit jeder herkömmlichen Fußballpumpe) nachträglich regulieren.

Bitte ziehen Sie das Ventil zwischen Daumen und Zeigefinger hoch, damit die Nadel nicht in die untere Seite des Ballkissens sticht. Achten Sie darauf, dass das Comfort Keil-Ballkissen® nicht prall mit Luft gefüllt ist. Weniger Luft-Innendruck hat mehr Wirkung, da nur dann die feinen Schwingungen, die sich auf die Bandscheiben und Wirbelsäule übertragen, ermöglicht werden.

Lagerung:

Bitte lagern Sie ihr Dynair® Comfort Keil-Ballkissen® immer flach liegend.

